
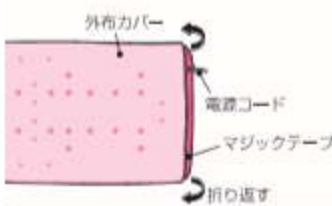
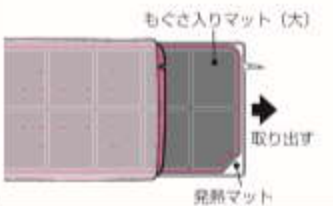



大マット用もぐさ入りマット交換方法 (交換作業は必ず電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください)


- 外布カバー (穴の開いた袋状のカバー) の電源コード側のマジックテープをはきし、2~3cm折り返します。

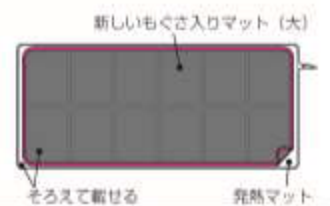

- 発熱マットとご使用したもぐさ入りマット (大) を取り出します。


- 発熱マットの上に新しいもぐさ入りマット (大) を重ねます。

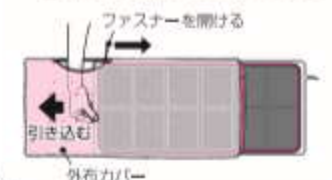
- 外布カバーの中に発熱マットと新しいもぐさ入りマット (大) を戻します。このとき外布カバーのファスナーより手を入れて引き込むと容易にできます。


- 外布カバーの中に入れた新しいもぐさ入りマットの角がしわにならないよう中に手を入れ、平らに広げます。


- マジックテープとファスナーを閉じて交換完了です。



ひざ・肩マット用もぐさ入りマット交換方法 (交換作業は必ず電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください)

- メッシュ面のファスナーを開けます。


- ファスナーの中からご使用したもぐさ入りマット (ひざ・肩) を取り出します。


- 中に入れる前に新しいもぐさ入りマット (ひざ・肩) の向きを合せます。


- 新しいもぐさ入りマット (ひざ・肩) を折りたたみ、ファスナー開放口より中に入れます。


- ファスナーより手を入れ、新しいもぐさ入りマット (ひざ・肩) がしわにならないよう平らに広げてください。


- ファスナーを閉じて交換完了です。



もぐさ入りマットは消耗品です。1日1時間の使用で2年から3年で交換してください。

注文等のお問合せは購入した販売店 (又は製造販売元) にご連絡ください。

使用開始日	平成	年	月	日	交換日	平成	年	月	日	次回交換予定日	平成	年	月	日
-------	----	---	---	---	-----	----	---	---	---	---------	----	---	---	---

※使用開始日から1年後が交換の目安です。

※交換日より1年後が交換の目安です。