

小マット用もぐさ入りマット交換方法

- マジックテープをはがし、2~3cm折り返します。
(中身を取り出しやすいように)
- 発熱マットとご使用したもぐさ入りマットの二点を同時に取り出しご使用したもぐさ入りマットだけを処分いたします。
- 発熱マットの上に新しいもぐさ入りマットを敷き重ねます。
(外布カバーの穴のあるほうが表側です)
- 外布カバーの穴のあいている裏カバーを持ちながら、発熱マット、新しいもぐさ入りマットの二点の左端をもって、少しずつゆっくりと入れていきます。
- 両端の角を押し、しわを伸ばします。
(中身にしわがよらないように)
- マジックテープをつけてセット完了です。

大マット用もぐさ入りマット交換方法

- 外布カバー(穴の開いた袋状のカバー)の電源コード側のマジックテープをはがし、2~3cm折り返します。
- 発熱マットと使用したもぐさ入りマット(大)を取り出します。
- 発熱マットの上に新しいもぐさ入りマット(大)を敷き重ねます。
- 外布カバーの中に発熱マットと新しいもぐさ入りマット(大)を戻します。このとき外布カバーのファスナーより手を入れて引き込みと容易にできます。
- 外布カバーの中に入れた新しいもぐさ入りマットの角がしわにならないように平らに広げます。
- マジックテープとファスナーを揃えて交換完了です。

もぐさ入りマットは消耗品です。1日1時間の使用で2年~3年で交換してください。

注文等のお問合せは購入された販売店(又は製造販売元)にご連絡ください。

使用開始日	年	月	日	交換日	年	月	日	次回交換予定日	年	月	日
-------	---	---	---	-----	---	---	---	---------	---	---	---