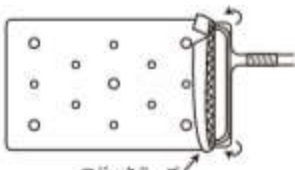
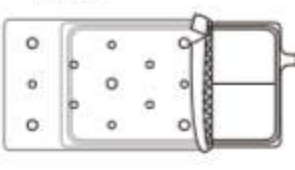
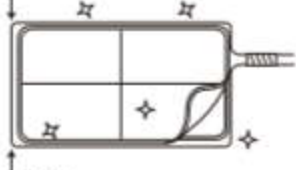
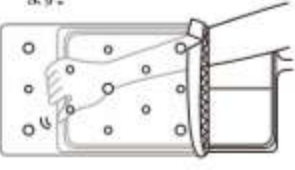
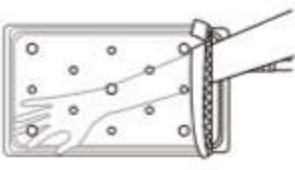
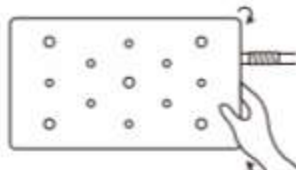


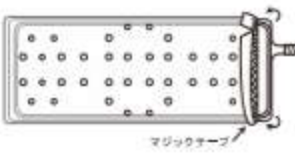
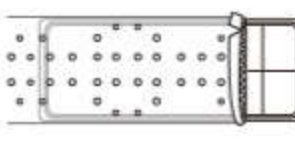
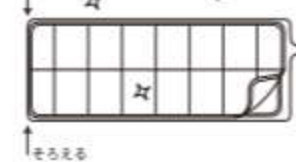

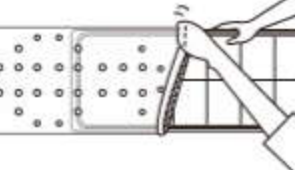
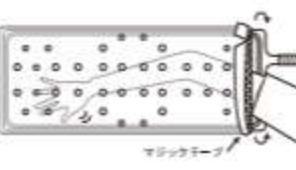
キューマット

交換用もぐさ入りマット交換方法

小マット用もぐさ入りマット交換方法

<p>1 マジックテープをはがし、2~3cm折り返します。 (中身を取り出しやすいように)</p> 	<p>2 発熱マットとトルマリンシートとご使用したもぐさ入りマットの三点を同時に取り出しご使用したもぐさ入りマットだけを処分いたします。</p> 	<p>3 発熱マットの上にトルマリンシート新しいもぐさ入りマットを順に重ねます。 (外布カバーの穴のあるほうが表側です)</p> 
<p>4 外布カバーの穴のあいている表カバーを持ちながら、発熱マット、トルマリンシート、新しいもぐさ入りマットの三点の左端をもって、少しずつゆっくりと入れていきます。</p> 	<p>5 両端の角を伸ばして、しわを伸ばします。 (中身にしわがよらないように)</p> 	<p>6 マジックテープをつけてセット完了です。</p> 

大マット用もぐさ入りマット交換方法

<p>1 発熱マット小と同様にマジックテープをはがし、2~3cm折り返します。 (中身を取り出しやすいように)</p> 	<p>2 発熱マット小と同様に発熱マットとトルマリンシートとご使用したもぐさ入りマットの三点を同時に取り出しご使用した、もぐさ入りマットだけを処分いたします。</p> 	<p>3 発熱マット小と同様に発熱マットの上にトルマリンシート新しいもぐさ入りマットを順に重ねます。三点の左端を挿入、合わせます。 (外布カバーの穴のあるほうが表側です)</p> 
<p>4 外布カバーの穴のあいている表カバーを持ちながら、発熱マット、トルマリンシート、新しいもぐさ入りマットの三点を持って、少しずつゆっくりと左右に動かしながら入れていきます。</p> 	<p>5 新しいもぐさ入りマットとトルマリンシートがよけたり、ずれたりしないように、注意して外布カバーの穴のあいている表カバーをがけていきます。</p> 	<p>6 発熱マット小と同様に両端の角を伸ばして、全体のしわを伸ばし、マジックテープをがけてセット完了です。</p> 

もぐさ入りマットは消耗品です。1日1時間の使用で2年~3年で交換してください。

注文等のお問合せは購入された販売店（又は製造販売元）にご連絡ください。

使用開始日	年	月	日	交換日	年	月	日	次回交換予定日	年	月	日
-------	---	---	---	-----	---	---	---	---------	---	---	---